

# A-dec® Checkliste für die Gerätewartung

## Nach jedem Patienten

---

- Handstücke reinigen, schmieren und sterilisieren
- Spritzenkanülen mit Ultraschall reinigen und sterilisieren
- Handstückschlauch abwischen und spülen
- Vakuumleitung bei Kieferoperationen spülen
- Berührungs- und Transportoberflächen reinigen/desinfizieren
- Alle Sperrschichten ersetzen

## Täglich/nach Bedarf

---

- A-dec ICX® bei jedem Auffüllen der Wasserflasche hinzufügen† (Teilenummern siehe Tabelle 3)
- Speibecken eine Minute lang spülen
- Speibecken und Speibeckenfilter reinigen
- Vakuumleitungen mit A-dec Absaugreiniger spülen† (Teilenummern siehe Tabelle 3)

## Wöchentlich/nach Bedarf

---

Datum

- Polsterung von Behandlungs- und Arbeitsstuhl mit einem milden Reiniger und Wasser säubern
- Ventile von Hochleistungsabsauger (HVE) und Speichelsauger reinigen
- Festkörpersammler zweimal pro Woche überprüfen und warten
- Ölsammler warten
- Handstückspannfutter schmieren
- Reibungslose Drehung des Handstückbohrers prüfen
- Schutzabdeckung der OP-Lampe mit mildem Spülmittel und Wasser säubern
- Wenn nötig, die Medicom® SafeShield™ Sperrschicht der OP-Lampe auswechseln

---

---

---

---

---

---

---

---

## Monatlich

---

Datum

- Die KBE-Konzentration im Wasser der Dentaleinheit testen und Wasserleitungen nach Bedarf einer Schockbehandlung mit A-dec ICX Renew® oder Restore® unterziehen (Teilenummern siehe Tabelle 3)
- Sämtliche O-Ringe an Handstücken und Motoren überprüfen und bei Verschleiß/Beschädigung austauschen
- O-Ringe an Wasserflasche, HVE und Speichelsauger schmieren

---

---

---

## Jährlich

---

Datum

- Zwecks Installation des Kits zur jährlichen vorbeugenden Wartung Ihren örtlichen A-dec Vertragshändler kontaktieren (Teilenummern siehe Tabelle 1)
- Sämtliche O-Ringe an Handstück und Motor ersetzen (Teilenummern siehe Tabelle 2)

---

---

\*Detaillierte Wartungsanweisungen erhalten Sie in der *Bedienungsanleitung*, die mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder im A-dec Ressourcencenter unter [www.a-dec.com/resource-center](http://www.a-dec.com/resource-center).

†Detaillierte Wartungsanweisungen für die Wasserleitung erhalten Sie im *Handbuch zur Wasserleitungswartung* (Teilenr. 85.0983.03), die mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder im A-dec Ressourcencenter unter [www.a-dec.com/resource-center](http://www.a-dec.com/resource-center).

A-dec Dentalgeräte sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Regelmäßige Inspektion und Ersatzteilversorgung gewährleisten eine zuverlässige Leistung.

**Tabelle 1: Wartungsteile und Kits von A-dec**

Element	Teilenummer
Silikonfett (5,3-Unzen-Tube)	98.1120.00
Siebfaller (A-dec 300/500), Packung mit 10 Stück	11.1284.01
Spritzenkanülen, Packung mit 5 Stück	23.0872.01
A-dec 500/300 Kit für die jährliche vorbeugende Wartung	90.1835.00
Performer®/Cascade®/200 Kit für die jährliche vorbeugende Wartung	90.1836.00
A-dec 500B Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1870.00
A-dec 500A Surf (V2) Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1874.00
A-dec 500A Surf (V1) Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1873.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1872.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1871.00
Cascade/Decade®/Performer Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1875.00
A-dec 200/Performer B (V1) Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1876.00
A-dec 200/Performer B (V2) Kit für die vorbeugende Wartung alle 5 Jahre	90.1877.00

**Tabelle 2: A-dec 501 Elektromotor-O-Ringe**

Element	Teilenummer
O-Ring, Motoreinsatz, blau	54.0803.00
O-Ring, Motoreinsatz, schwarz	54.0804.00
O-Ring, Motorschlauchverbindung	54.0805.00

**Tabelle 3: Für die Wartung von Wasserleitungen von Dentaleinheiten (DUWL) und Absaugsystemen empfohlene A-dec 360 Produkte**

Anwendung	Element	Teilenummer
Absaugsystem	Absaugsystemreiniger, 33-Unzen-Flasche	91.0060.01
Absaugsystem	Absaugsystemreiniger, 128-Unzen-Flasche	91.0061.01
Tägliche DUWL-Wartung	ICX Wasserleitungstabletten, 0,7 l (50 Stück)	91.1064.01
Tägliche DUWL-Wartung	ICX Wasserleitungstabletten, 2 l (50 Stück)	90.1065.01
DUWL-Schockbehandlung	ICX Renew, Packung für 9 Anwendungen	90.1691.01
DUWL-Schockbehandlung	ICX Restore, Packung für 9 Anwendungen (nur Kanada)	90.1821.01

Wenden Sie sich an einen A-dec Vertragshändler, wenn Sie weitere Zubehör- und Ersatzteiloptionen benötigen.

