

Checkliste für die Gerätewartung*

Nach jedem Patienten

- Handstücke reinigen, schmieren und sterilisieren
- Spritzenkanülen (mit Ultraschall) reinigen und sterilisieren
- Handstückschlauch abwischen und spülen
- Vakuumleitungen spülen (für Kieferoperationen)
- Berührungs- und Transportoberflächen reinigen/desinfizieren
- Alle Sperrschichten ersetzen

Täglich oder bei Bedarf

- A-dec ICX® bei jedem Auffüllen der Wasserflasche hinzufügen†
- Speibecken eine Minute lang spülen
- Speibecken und Speibeckenfilter reinigen
- Vakuumleitungen spülen

Wöchentlich oder nach Bedarf

Datum/Uhrzeit

- Polsterung von Behandlungs- und Arbeitsstuhl mit einem milden Reiniger und Wasser säubern _____
- Ventile von Hochleistungsabsauger (HVE) und Speichelsauger reinigen _____
- Festkörpersammler überprüfen und warten (zweimal pro Woche) _____
- Ölsammler warten (monatlich, wenn eine Assistina zur Wartung der Handstücke verwendet wird) _____
- Handstückspannfutter schmieren _____
- Schutzabdeckung der OP-Lampe mit einem milden Reiniger und Wasser säubern (mit ca. 5 x 5 cm (2 x 2 Zoll) großem Mullstück oder weichem Tuch, um ein Verkratzen des Schirms zu vermeiden) _____
- Wenn nötig, die Medicom® SafeShield™ Sperrschicht der OP-Lampe auswechseln _____

Monatlich

Datum/Uhrzeit

- Wasserqualität überwachen und Wasserleitungen nach Bedarf warten† _____
- Ölsammler warten (wöchentlich durchführen, wenn keine Assistina zur Wartung der Handstücke verwendet wird) _____
- Sämtliche O-Ringe an Handstück, Motor und Assistina überprüfen und bei Verschleiß/Beschädigung austauschen _____
- O-Ringe an HVE und Speichelsauger schmieren _____
- O-Ringe an Wasserflasche schmieren _____

Jährlich

Datum/Uhrzeit

- Spritzen-O-Ringe und Tasten-Ventil-Baugruppen austauschen und schmieren _____
- O-Ringe an HVE und Speichelsauger ersetzen und schmieren _____
- Sämtliche O-Ringe an Handstück, Motor und Assistina austauschen _____
- Luft- und Wasserfilter im Anschlussgehäuse oder Versorgungsbereich ersetzen _____

