

機器保守点検チェックリスト*

患者ごと

毎日または必要に応じて

- ハンドピースの洗浄、潤滑剤塗布、滅菌
- シリンジタイプの（超音波）洗浄と滅菌
- ハンドピースチューブの拭き取りとフラッシュ
- バキュームラインのフラッシュ（口腔内手術の場合）
- 接触面と搬送面の洗浄/滅菌
- 全バリアの交換
- 各ウォーターボトルのリフィルに A-dec ICX®を追加†
- カスピドールのフラッシュ（1分間）
- カスピドールのボウルとボウルスクリーンの洗浄
- バキュームラインのフラッシュ

週ごとまたは必要に応じて

日付/時刻

- 中性洗剤と水でチェアとスツールの張地を洗浄
- HVEと排唾管のバルブの洗浄
- 固形物収集器の保守点検（週に2回）
- オイルコレクターの保守（ハンドピースの保守にAssistinaを使用する場合は毎月実行）
- ハンドピースチャックの潤滑剤塗布
- 中性洗剤と水で歯科用ライトシールドを洗浄
（2" x 2"のガーゼまたは柔らかい布を使用し、シールドを傷つけない）
- 必要に応じて、歯科ライトMedicom® SafeShield™バリアを交換

毎月

日付/時刻

- 必要に応じて、歯科ユニットウォーターCFULレベルをテストし、ウォーターラインを処理†
- オイルコレクターの保守（ハンドピースの保守にAssistinaを使用しない場合は毎週実行）
- すべてのハンドピース、モーター、Assistina Oリングを検査し、摩耗や損傷がある場合は交換
- HVEと排唾管のOリングへの潤滑剤塗布
- ウォーターボトルのOリングへの潤滑剤塗布

毎年

日付/時刻

- シリンジのOリングおよびボタン/バルブアセンブリの交換と潤滑剤塗布
- HVEと排唾管のOリングの交換および潤滑剤塗布
- すべてのハンドピース、モーター、Assistina Oリングの交換
- フロアボックスまたはユーティリティエリアにあるエアフィルタとウォーターフィルタの交換



 A-dec本社

1.800.547.1883 (米国/カナダ国内)
+1.503.538.7478 (米国/カナダ国外)
www.a-dec.com

* 保守点検手順の詳細については、ご利用の機器に同梱されている取扱説明書を参照するか、www.a-dec.comをご覧ください。

† ウォーターラインの保守点検の詳細については、機器に同梱されている『Waterline Maintenance Guide (ウォーターライン保守点検ガイド)』(P/N 85.0983.05)を参照するか、www.a-dec.comをご覧ください。

86.0600.05 Rev E

発行日 2020-03-11

Copyright 2020 A-dec Inc.

無断複写・複製・転載を禁ず。