

# 设备维护清单\*

## 每位病人用过之后

## 每天一次，或根据需要

- 对牙科手机进行清洁、润滑和灭菌
- 对喷枪喷嘴进行清洁（使用超声波）和灭菌
- 冲洗牙科手机软管并将其擦干
- 冲洗真空管路（对于口腔手术过程）
- 清洁/消毒触摸面和转移面
- 更换所有隔离物
- 在每次重新灌满水瓶时添加A-dec ICX®†
- 冲洗痰盂一分钟
- 清洁痰盂和痰盂过滤网
- 冲洗真空管路

## 每周一次，或按需

日期/时间

- 用温和的洗碗皂液或清水清洁治疗椅和座椅皮垫
- 清洁HVE和吸唾器阀
- 检查和维护固体物收集器（每周两次）
- 维护集油器（如果使用Assistina维护牙科手机，则每月维护一次）
- 润滑牙科手机夹头
- 用温和的洗碗皂液或清水清洁牙科手术灯灯罩  
（使用51毫米 x 51毫米[2英寸 x 2英寸]纱布或软布，避免划破灯罩）
- 如果需要，请更换Medicom® SafeShield™隔离物

---

---

---

---

---

---

---

## 每月一次

日期/时间

- 测试牙科治疗台用水CFU级别并按需处理水管线路†
- 维护集油器（如果未使用Assistina来维护牙科手机，则每周维护一次）
- 检查所有牙科手机、马达和Assistina O形环；若出现警告/损坏，请更换
- 润滑HVE和吸唾器O形环
- 润滑水瓶O形环

---

---

---

---

---

## 每年一次

日期/时间

- 更换和润滑牙科喷枪O形环和按钮阀装置
- 更换和润滑HVE与吸唾器O形环
- 更换所有牙科手机、马达和Assistina O形环
- 更换地箱或水电和气体管线区域的空气与水过滤器

---

---

---

---

