

設備維護核對清單*

為每位病人治療後

每日或視需要而定

- 清潔·潤滑並消毒牙科手機
- 清潔並消毒牙科噴槍尖嘴 (使用超音波)
- 擦拭及沖洗牙科手機導管
- 沖洗真空管線 (針對口腔牙科手術程序)
- 清潔/消毒接觸及傳導表面
- 更換所有隔離材料
- 在每個替換水瓶中加入 A-dec ICX®†
- 沖洗痰盂一分鐘
- 清潔痰盂和痰盂沖洗篩
- 沖洗真空管線

每週或視需要而定

日期/時間

- 使用溫和的洗潔精和清水清潔治療椅和牙醫座椅包面
- 清潔強力吸引器 (HVE) 和排涎器閥
- 檢查並維護固體物收集器 (每週兩次)
- 維護集油器 (如果使用 Assistina 維護牙科手機則每月進行一次)
- 潤滑牙科手機吸盤
- 使用溫和的洗潔精和清水清潔牙科手術燈燈罩 (使用2吋 x 2吋紗布或柔軟布料以免刮花護罩)
- 如適用·更換牙科手術燈 Medicom® SafeShield™ 的隔離材料

每月

日期/時間

- 測試牙科裝置用水的 CFU 水平·並根據需要處理水管線路†
- 維護集油器 (如果未使用 Assistina 維護牙科手機則每週進行一次)
- 檢查所有牙科手機馬達·Assistina O 形環；如有磨損/損壞請即更換
- 潤滑強力吸引器 (HVE) 和排涎器 O 形環
- 潤滑水瓶 O 形環

每年

日期/時間

- 更換並潤滑牙科噴槍 O 形環和按鈕閥裝置
- 更換並潤滑強力吸引器 (HVE) 和排涎器 O 形環
- 更換所有牙科手機、馬達和 Assistina O 形環
- 更換地箱或水電和氣體設施區域中的來氣及來水濾芯



A-dec 總部
1.800.547.1883 (美國/加拿大境內)
+1.503.538.7478 (美國/加拿大境外)
www.a-dec.com

* 如需詳細的維護步驟·請參閱設備隨附的《使用指引》·
或瀏覽www.a-dec.com。

† 如需詳細的水管線路維護資訊·請參閱設備隨附的
《水管線路維護指南》(零件編號 (P/N) 85.0983.07)·
或瀏覽www.a-dec.com。

86.0600.07 Rev E
發行日期 2020-03-11
Copyright 2020 A-dec Inc.
本公司保留全部版權。